

Clearblue PLUS

Teste de gravidez PLUS

Clearblue PLUS tem precisão acima de 99% a partir do dia em que a menstruação deve iniciar.

Clearblue PLUS pode ser usado até quatro dias antes de sua menstruação iniciar.

Leia este folheto com atenção antes de fazer o teste.

Antes de começar

Pode ser útil ter um relógio disponível ao fazer o teste.

1 Fazendo o teste

Se estiver testando a partir do dia em que a menstruação deve iniciar, você pode testar a qualquer horário.

Se estiver testando antes, use a primeira urina do dia.

- Quando estiver pronta para testar, retire o Medidor de teste da embalagem de papel laminado e retire a tampa azul. Use o Medidor de teste imediatamente.

Teste sua urina

Você pode testar diretamente no fluxo da urina **ou** em uma amostra de urina coletada em um recipiente limpo e seco.


- Segure a Ponta de mudança de cor apontando para baixo no fluxo da urina ou na amostra de urina coletada, como mostrado, por **5 segundos**.
- A Ponta de mudança de cor torna-se rosa rapidamente, mostrando que a urina está sendo



absorvida. **Continue segurando a Ponta de mudança de cor na urina durante os 5 segundos completos.**



Continue segurando a Ponta de mudança de cor na urina durante os 5 segundos completos.

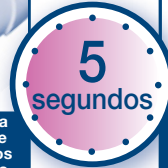

Comece a contar 5 segundos assim que a Ponta de mudança de cor se tornar rosa.

Fluxo de urina **OU** Amostra coletada

- Mantenha a Ponta de mudança de cor apontada para baixo, ou deixe o Medidor de teste na horizontal até que você possa ler o resultado e uma linha azul apareça no Visor de controle.
- Você pode recolocar a tampa.

Consulte a **pergunta 7** se a Ponta de mudança de cor não se tornou completamente rosa.

2

3 minutos

ESPERE 3 minutos. Quando o teste começar a ser processado, linhas azuis começarão a aparecer.

3

3 LENDO O SEU RESULTADO

Você pode ler seu resultado no Visor de resultado.


Uma linha azul deve estar presente no Visor de controle quando você ler o seu resultado. Essa linha mostra que o teste funcionou.

É possível obter um resultado 'Grávida' dentro de 1 minuto quando o teste for realizado a partir do dia em que sua menstruação deve iniciar (que é o dia seguinte aquele em que sua menstruação deveria ter iniciado).

Espera 3 minutos para confirmar um resultado 'Não grávida' ou caso esteja realizando o teste antes de sua menstruação ter atrasado.

(consulte a **pergunta 11**)

Se nenhuma linha azul aparecer no Visor de controle dentro de **10 minutos** o teste não funcionou (consulte a **pergunta 8**).

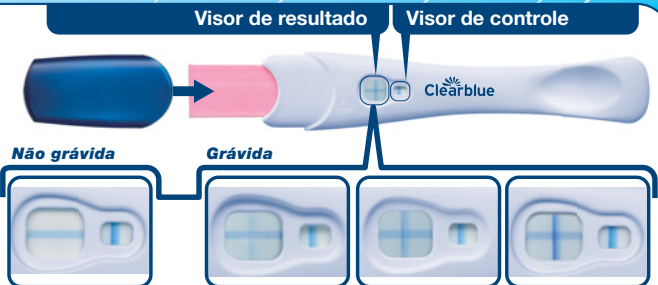

Se o seu resultado for 'Não grávida' consulte a **pergunta 13** nas Perguntas e respostas.

Se o seu resultado for 'Grávida' consulte a **pergunta 14** nas Perguntas e respostas.

Não importa se uma das linhas que constituem o símbolo "+" é mais clara ou escura que a outra; o resultado é 'Grávida'.

IMPORTANTE! Leia seu resultado dentro de **10 minutos** depois de fazer o teste.

Desconsidere qualquer alteração no resultado depois desse período.

Se você ainda tiver dúvidas quanto ao resultado consulte a **pergunta 9** para ver os detalhes.

Perguntas e respostas

- Qual é a precisão de Clearblue PLUS?**
Clearblue PLUS tem precisão acima de 99% em testes de laboratório, quando usado no dia em que a menstruação deve iniciar.
- Como Clearblue PLUS funciona?**
Quando você está grávida, seu corpo produz o hormônio da gravidez hCG (Gonadotrofina coriônica humana). A quantidade de hCG em seu corpo aumenta nas fases iniciais da gravidez. Clearblue PLUS pode detectar quantidades mínimas desse hormônio em sua urina. (A sensibilidade do teste é de 25 mIU/mL).
- Quando eu posso usar Clearblue PLUS?**
O Clearblue PLUS pode ser usado até 4 dias antes de sua menstruação iniciar. Se você testar antes do dia em que a menstruação deve iniciar e obter o resultado "Não grávida", ainda há uma chance de que você esteja grávida. Consulte no gráfico abaixo os resultados do teste clínico do Clearblue PLUS com amostras do início da gravidez.
- Eu preciso usar a primeira amostra de urina da manhã?**
Se estiver testando antes do dia em que a menstruação deve iniciar, use a primeira urina do dia. Do contrário, você pode testar a qualquer horário. Evite tomar excesso de líquidos antes de testar.

Teste precoce

Clearblue recomenda que você teste a partir do dia em que a menstruação deve iniciar. No entanto, o hormônio de gravidez aumenta rapidamente no início da gravidez e o Clearblue PLUS pode ser usado para testar até 4 dias antes do dia em que a menstruação deve iniciar. Nos testes clínicos com amostras do início da gravidez, o Clearblue PLUS apresentou os resultados a seguir:

Número de dias antes do dia em que a menstruação deve iniciar

Número de dias antes do dia em que a menstruação deve iniciar	% de amostras de mulheres grávidas que apresentam o resultado "Grávida"
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

- Eu não sei quando é o primeiro dia da minha próxima menstruação. Como eu sei se estou testando na hora certa?**
Para saber o dia em que a menstruação deve iniciar, calcule a duração do seu ciclo habitual contando o número de dias desde o primeiro dia da menstruação até o dia antes que a próxima menstruação se inicia.
 - Se você tiver ciclos irregulares, conte o seu ciclo mais longo nos últimos meses antes de testar.
 - Se você não tem ideia de qual é o dia em que a menstruação deve iniciar, recomendamos testar não menos de 19 dias depois da última vez em que você teve relações sexuais sem proteção.
 - Se o resultado for "Não grávida" e ainda existe suspeita de gravidez, consulte a pergunta 13.
- Algum medicamento ou condição médica pode afetar o resultado?**
 - Leia sempre as instruções do fabricante do medicamento que você está tomando, antes de fazer o teste.
 - Medicamentos para fertilidade contendo hCG podem dar resultados enganosos (geralmente, esses medicamentos são injetados e testar logo após a administração pode dar um falso resultado "Grávida").
 - Outras terapias de fertilidade (como citrato de clomifeno), analgésicos e contraceptivos hormonais (por exemplo, pílula anticoncepcional) não devem afetar o resultado.
 - Se você deixou de usar recentemente a contracepção hormonal ou faz terapias de fertilidade como por exemplo o citrato de clomifeno, sua menstruação pode ser irregular e isso fará você testar muito cedo.
 - Se você engravidou recentemente, (mesmo que a gravidez não tenha ido até o final), pode obter um resultado "Grávida" falso.
 - Gravidez ectópica, cistos ovarianos, menopausa e algumas condições médicas muito raras podem dar resultados enganosos.
 - Se você teve um resultado "Grávida" é possível que mais tarde descubra que não está grávida, devido à perda natural da gravidez que pode ocorrer nas primeiras fases.
- Se você tiver resultados inesperados, converse com o seu médico.**
- Eu usei o Teste de gravidez, mas a Ponta de mudança de cor não se tornou completamente rosa. O que eu devo fazer?**
Se a Ponta de mudança de cor não se tornou completamente rosa você pode não ter aplicado urina suficiente. No entanto, se a linha azul no Visor de controle aparecer

- dentro de 10 minutos após a realização do teste, isso indica que ele funcionou. Se nenhuma linha azul aparecer no Visor de controle dentro de 10 minutos após a realização do teste, consulte a pergunta 8.**
- Eu usei o Teste de gravidez, mas nenhuma linha azul apareceu no Visor de controle. O que eu devo fazer?**
Se não houver uma linha azul no Visor de controle dentro de 10 minutos após a realização do teste, o teste não funcionou. O motivo pode ser que:
 - A Ponta de mudança de cor não foi mantida apontada para baixo ou o Medidor de teste não ficou na horizontal depois que a urina foi aplicada.
 - Uma quantidade excessiva ou insuficiente de urina foi usada. **Você deve fazer a amostragem por 5 segundos.**
 Você deve testar novamente com um novo Medidor de teste, tomando o cuidado de seguir as instruções. Você pode desejar coletar uma amostra de sua urina em um recipiente limpo e seco e mergulhar apenas a Ponta de mudança de cor por 5 segundos.
- Se eu estiver duvidosa sobre o meu resultado?**
 - Para que o seu resultado seja "Grávida", deve haver uma linha azul no Visor de controle e um símbolo "+" e a linha no Visor de controle devem ter uma largura semelhante (ver Figuras A-C).
- Figura A**
Isso indica o resultado "Grávida". É provável que você esteja testando antes do dia em que a menstruação deve iniciar, quando os níveis de hCG podem ser relativamente baixos.
- Figura B**
Isso não é incomum quando você está grávida e está testando perto do dia em que a menstruação deve iniciar, uma vez que os níveis de hCG ainda são relativamente baixos.
- Figura C**
Isso é mais provável de ocorrer quando você está grávida e está testando alguns dias depois do dia em que a menstruação deve iniciar, uma vez que os níveis de hCG são mais altos. Se você ainda tiver dúvidas quanto ao resultado, espere pelo menos 3 dias antes de testar novamente, tomando o cuidado de seguir as instruções.
- Para que o resultado seja "Não grávida", deve haver uma linha azul no Visor de controle e um símbolo "-" (menos) no Visor de resultado dentro de 10 minutos após a realização do teste. Se o seu resultado for "Não grávida" e ainda houver suspeita de gravidez, consulte a pergunta 13.
- O que pode afetar a precisão do resultado?**
Se você estiver testando antes do dia em que sua menstruação deve começar, a precisão do Clearblue PLUS será mais baixa. Se você não fizer a amostragem da urina durante o tempo correto, o resultado pode não ser confiável. No entanto, se você vir uma linha azul no Visor de controle dentro de 10 minutos após a realização do teste, pode confiar no resultado. Se você receber resultados inesperados várias vezes, consulte o seu médico. Além disso, consulte a pergunta 6.
- Quando eu posso ler o resultado?**
Um resultado "Grávida" pode aparecer em até 1 minuto caso esteja realizando o teste a partir do dia em que sua menstruação atrasou (que é o dia seguinte aquele em que sua menstruação deveria ter iniciado). Verifique se sua linha azul também está presente no Visor de controle antes de ler seu resultado. Você deve esperar 3 minutos para confirmar um resultado "Não grávida" ou caso esteja realizando o teste antes de sua menstruação ter atrasado. Se nenhuma linha azul aparecer no Visor de controle dentro de 10 minutos, o teste não funcionou (consulte a pergunta 8).
- Quanto tempo dura o resultado?**
O resultado pode ser lido a qualquer momento de 3 a 10 minutos. Depois de 10 minutos, qualquer alteração no resultado deve ser desconsiderada.
- Meu teste diz que eu não estou grávida. O que eu devo fazer?**
Você pode não estar grávida, ou o seu nível de hormônio da gravidez ainda não está alto o suficiente para ser detectado, ou então você calculou errado o dia em que a menstruação deve iniciar.
 - Se você testou muito cedo, teste novamente no dia em que a menstruação deve iniciar.
 - Se o primeiro dia da menstruação já passou, teste novamente em 3 dias. Se o teste der o resultado "Não grávida" e você ainda não menstruou, consulte o seu médico.
- Meu teste diz que eu estou grávida. O que eu devo fazer?**
Se o teste indicar que você está grávida, consulte o seu médico e ele aconselhará o que você deve fazer a seguir.

Para saber os próximos passos, informações e conselhos gerais sobre questões de gravidez, visite nosso site:

www.clearblue.com

Dados obtidos a partir de estudos disponíveis em www.clearblue.com.br/referenciasbibliograficas

Este aparelho é para uso caseiro. Para uso em diagnóstico in vitro apenas.

Não previsto para uso interno. Usar uma única vez. Armazenar em temperatura ambiente.

Deixar atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de testar, se armazenado refrigerado. Mantenha fora do alcance de crianças. Descartar com o lixo doméstico normal. Não usar se a embalagem de papel laminado estiver danificada.

Não usar o Medidor de Teste após a data de validade.

Autoteste para orientação de gravidez sem fins diagnósticos.

Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG, anticorpo monoclonal anti-alpha TSH, IgG de cabra, IgG de cabra anti-coelho, IgG de coelho e partículas de látex.

0800 047 4467

As chamadas são gratuitas de telefones fixos, mas as chamadas de celulares podem ser cobradas; verifique com sua operadora. Se nenhum consultor que fale português estiver disponível, você pode falar conosco em inglês ou com a ajuda de um tradutor. Tenha em mãos os números de lote, da embalagem externa e interna. As chamadas são gravadas para fins de treinamento e controle de qualidade.

IVD Aparelho de diagnóstico médico in vitro	LOT Código do lote	Não reutilize
Limite de temperatura 2°C - 30°C	Usar até	Fabricante

Fabricado por: Alere (Shanghai) Diagnostics Co. Ltd, 151 Libing Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong District, Shanghai 201203, PR China para SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça. © 2015 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Todos os direitos reservados. Clearblue é uma marca registrada. IMPORTADOR: Emergo Brazil Import/Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, S/A Trecho 3, Lotes 2010/2020, 1º Andar, Ed. Myrian Bairro: Zona Industrial Cidade: Brasília/UF:DF - CEP: 71.200-030 CNPJ: 04.967.406/0001-98. Responsável Técnico: Julia Zema Parente Pinto CRF/DF: 2508 Registro ANVISA N°: 80117580224

