

Clearblue®

Teste de Gravidez com Indicador de semanas



Para autodiagnóstico. Leia esta bula com atenção antes de fazer o teste.

99,9% de precisão na detecção da gravidez a partir do dia do início esperado da menstruação

Se estiver testando precocemente, use a primeira urina do dia. Do contrário, teste a qualquer hora

Não beba muito líquido antes do teste

Nunca segure o teste com a ponta apontado para cima

1 Faça o teste

Remova da embalagem, retire a tampa e use imediatamente. **Você** pode testar com:




ou



Recoloque a tampa e deixe o medidor de teste na horizontal.

2 Aguarde

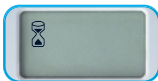

O símbolo de espera piscará para mostrar que o teste está funcionando e seu resultado aparecerá em 1 a 3 minutos.

Se o símbolo de espera não aparecer, consulte "Erros do teste".

3 Leia seu resultado

É possível obter um resultado "Grávida" no visor antes do resultado do Indicador de semanas.




Você concebeu há aproximadamente 1 - 2 semanas atrás. Seu médico determinará o tempo de gravidez como 3 - 4 semanas.



Você concebeu há aproximadamente 2 - 3 semanas atrás. Seu médico determinará o tempo de gravidez como 4 - 5 semanas.



Você concebeu há mais de 3 semanas. Seu médico determinará o tempo de gravidez como 5+ semanas.

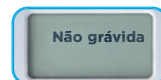

Se o resultado for **Não grávida**, veja a pergunta 4.

Se o resultado for **Grávida**, veja a pergunta 2.

O Indicador de semanas é 93% de precisão em detectar quando você concebeu (veja a pergunta 3). Seu médico determinará o tempo de gravidez usando um método diferente com base no primeiro dia de sua última menstruação.

Perguntas e respostas

1 Quando devo fazer o teste?

Use a primeira urina do dia para um resultado preciso do Indicador de semanas ou ao testar precocemente.

2 Meu resultado é "Grávida". O que devo fazer?

Consulte seu médico para saber quais são os próximos passos. O teste Clearblue com Indicador de semanas tem 99,9% de precisão para detectar a gravidez a partir do dia de início esperado da menstruação. Um resultado de "Grávida" permanecerá no visor por aproximadamente 24 horas.

3 Qual é a precisão do Indicador de semanas?

O Indicador de semanas tem 93% de precisão em detectar quando você concebeu ao testar com a primeira urina do dia. A concepção ocorre cerca de 2 semanas antes do início esperado da menstruação. Seu médico determinará o tempo de gravidez usando um método diferente com base no primeiro dia de sua última menstruação (baseado em um ciclo de 28 dias). Demonstrou-se que o Indicador de semanas tem 97% de concordância com a mais recente ultrassonografia para determinação do tempo de gravidez (11 a 13 semanas). Com base em estudos com 187 mulheres, comparando os resultados (1 a 2, 2 a 3, 3+ semanas desde a concepção) com os dados de ultrassonografia.

4 Meu resultado é "Não grávida". O que isso significa?

Você pode não estar grávida ou o nível de hormônio da gravidez pode ainda não estar alto o suficiente para ser detectado.

Se você ainda acha que está grávida, faça um novo teste em três dias. Se o resultado desse teste for "Não grávida" e sua menstruação estiver atrasada, consulte seu médico.

5 Quando posso fazer o teste?

Este teste pode ser usado a partir de 5 dias antes de seu atraso menstrual (4 dias antes do início esperado da menstruação). Contudo, como os níveis hormonais variam de mulher para mulher e podem ser muito baixos no início da gravidez, você pode estar grávida e, mesmo assim, obter um resultado negativo. A tabela abaixo mostra o percentual de resultados positivos apontados em exames de laboratório com amostras de urina do início da gravidez:

Dias antes do atraso menstrual	-2	-3	-4	-5
Gestações detectadas	98%	97%	90%	65%

6 Como o Clearblue com Indicador de semanas funciona?

Ele detecta o hormônio da gravidez hCG (gonadotrofina coriônica humana) na urina e também pode usar os níveis hormonais para indicar as semanas desde que você concebeu. A sensibilidade do teste é 25mIU/mL.

7 Algum medicamento ou condição médica pode afetar os resultados?

Sempre leia as instruções do fabricante sobre qualquer medicamento que você esteja tomando antes de fazer um teste. Se obtiver resultados inesperados, você deve conversar com seu médico. Medicamentos com hCG podem afetar o resultado. Gravidez ectópica ou gravidez recente, mesmo que não levadas a termo, podem causar resultados incorretos. Se você estiver na menopausa ou perto dela, você pode obter um falso resultado de gravidez, mesmo que não esteja grávida.

O teste **NÃO** é afetado por terapias hormonais com citrato de clomifeno, analgésicos, bebidas alcoólicas, antibióticos nem pílula anticoncepcional. Gravidez ectópica e com múltiplos fetos pode dar resultados incorretos do Indicador de semanas.

8 Alguma outra coisa pode afetar o resultado?

O Indicador de semanas pode dar resultados inesperados se você testar mais de 6 semanas depois da concepção, porque o nível de hCG na urina é muito alto para o teste fornecer uma estimativa exata do tempo desde a concepção.

9 Meu resultado anterior foi "Grávida", mas repeti o teste e obtive um resultado negativo ou minha menstruação iniciou. O que isso significa?


É possível obter um resultado positivo e depois descobrir que você não está mais grávida. Isso se chama "perda de gravidez precoce", que não é incomum, afetando cerca de 1 a cada 4 gestações. A maioria das mulheres pode ter uma gravidez saudável depois disso.

10 Fiz o teste novamente e o resultado do Indicador de semanas diminuiu. O que isso significa?


O nível de hCG pode flutuar enquanto ele aumenta, portanto é possível que o Indicador de semanas forneça resultados inesperados se você testar em dias consecutivos. Você deve esperar pelo menos 3 dias antes de fazer o teste novamente, usando a primeira urina do dia. Se já se passaram mais de 5 dias desde a última vez que você fez o teste e o resultado do Indicador de semanas diminuiu, consulte seu médico.

Erros do teste

Erro do livro

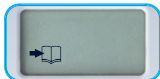

Erro de espaço em branco

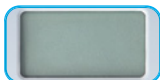

Ocorreu um erro durante o teste. Pode ser que:

- a ponta absorvente não foi mantida apontada para baixo
 - o teste não foi colocado na horizontal após a urina ser aplicada
 - a quantidade de urina aplicada na ponta foi excessiva ou insuficiente
- Repita o teste usando um novo teste, seguindo as instruções com cuidado.

O teste não funcionou como esperado, você precisará fazer outro teste. Repita o teste usando um novo teste, seguindo as instruções com cuidado.

0800 047 4467

As chamadas são gratuitas de telefones fixos, mas as chamadas de celulares podem ser cobradas; verifique com sua operadora. Se nenhum consultor que fale português estiver disponível, você pode falar conosco em inglês ou com a ajuda de um tradutor. Quando ligar, tenha em mãos o produto e a embalagem, incluindo embalagens de papel laminado. As chamadas são gravadas para fins de treinamento e controle de qualidade.

Para descartar o teste: remova as baterias antes do descarte do teste. Elas devem ser descartadas em conformidade com o esquema de reciclagem apropriada. Para removê-las, insira uma moeda na abertura e gire para abrir a parte de trás do teste. Empurre o suporte de bateria na direção da seta para auxiliar na remoção. Descarte o resto do teste de acordo com as regras locais de reciclagem relacionadas a equipamentos elétricos. Não descarte equipamento elétrico no fogo.

Cuidado: não desmonte, recarregue ou descarte baterias em fogo. Contém peças pequenas. Não ingira nenhum componente desse dispositivo. Se engolir algum acidentalmente, procure um médico. Relate qualquer dano causado pelo uso desse produto à Clearblue.

Autoteste para orientação de gravidez, sem fins diagnósticos. Sempre leia as instruções dos fabricantes sobre qualquer medicamento que você esteja tomando antes de fazer um teste.

LOT	Código do lote	IVD	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>	Fabricante
Use no prazo de validade	Limite de temperatura 2 °C a 30 °C	Não reutilize		

Para autodiagnóstico em casa. Apenas para uso de diagnóstico *in vitro*. Não serve para uso interno. Não reuse. Mantenha longe do alcance de crianças. Armazene entre 2° - 30°C. Mantenha em temperatura ambiente por 30 minutos antes do teste se refrigerado. Não use se a embalagem estiver danificada. Não use após a data de validade indicada. Esse produto inclui baterias.

Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG, anticorpo monoclonal anti-alfa TSH, IgG de cabra anti-coelho, IgG de coelho e partículas de látex.

Dados obtidos a partir de estudos disponíveis em www.clearblue.com.br/referenciasbibliograficas

IMPORTADOR: MANDALA BRASIL Importação e Distribuição de Produto Médico Hospitalar Ltda. Av. Horácio Racanelo Filho, nº 5570, salas 502, 1201 e 1202, Ed. São Bento, Zona 07, Maringá/PR, Brasil. CEP: 87020-035. CNPJ: 09.117.476/0001-81

Responsável Técnico: Rafaela Bonchoski Siolin - CRF/PR 29240

FABRICANTE: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça. País de origem: China.

Clearblue é uma marca registrada da Swiss Precision Diagnostics (SPD).

© 2020 SPD. Todos os direitos reservados.

Registro ANVISA nº: 80686360215

733292.0 07-2020