


Teste de Gravidez

Deteção Rápida

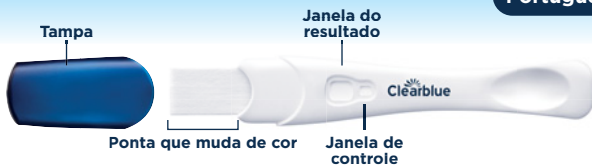

Para autodiagnóstico. Leia a bula com atenção antes de fazer o teste.

99,9% de precisão a partir do início esperado da menstruação

ou Resultados fáceis de ler

Não beba muito líquido antes do teste

Leia o resultado dentro de 10 minutos



1 Faça o teste

Remova da embalagem de papel laminado, retire a tampa e use imediatamente.

Coloque a ponta que muda de cor por **5 segundos**:

IMPORTANTE! Mergulhe a ponta completamente como mostrado



em seu fluxo de urina

5 segundos

ou



em uma amostra de urina coletada

5 segundos

IMPORTANTE: A ponta que muda de cor fica rosa rapidamente, o que mostra a absorção de urina, mas você **DEVE continuar segurando a ponta em sua urina por 5 segundos completos**.

Recoloque a tampa e deixe o medidor de teste na horizontal.

Se a ponta não ficar completamente rosa, consulte “Erros do teste”.

2 Aguarde



- Um resultado de Grávida “+” pode aparecer em 1 minuto quando o teste for realizado a partir de seu atraso menstrual (o dia seguinte ao dia de início esperado da menstruação).
- Espere 3 minutos para confirmar um resultado Não grávida “-”. Se nenhuma linha azul aparecer, veja “Erros do teste”.

3 Resultados

Grávida - se seu resultado for “Grávida”, consulte seu médico (consulte a pergunta 1).

Figura A



Janela do resultado Janela de controle

Figura B



Figura C



Se você tiver dúvidas sobre seu resultado, consulte a pergunta 6.

Não grávida

(consulte a pergunta 2).



Deve haver uma linha azul na janela de controle para que o resultado seja válido. Caso contrário, consulte “Erros do teste”. **IMPORTANTE!** Leia o resultado em até **10 minutos** após o teste. Desconsidere qualquer alteração depois desse período.

Perguntas e respostas

1 Meu resultado é “Grávida”. O que devo fazer?

Consulte seu médico para saber quais são os próximos passos. É possível obter um resultado positivo e depois descobrir que você não está mais grávida (consulte a pergunta 7).

2 Meu resultado é “Não grávida”. O que isso significa?

Você pode não estar grávida ou o nível de hormônio da gravidez pode ainda não estar alto o suficiente para ser detectado. Faça um novo teste em três dias. Se o resultado desse teste for “Não grávida” e sua menstruação estiver atrasada, consulte seu médico.

3 Não tenho certeza de quando será o início esperado da minha menstruação. Como eu sei se estou testando na hora certa?

Para saber o dia em que a menstruação é esperada, calcule a duração habitual do seu ciclo contando o número de dias a partir do primeiro dia da sua menstruação até o dia anterior ao início da próxima menstruação. Se você tiver ciclos irregulares, conte o seu ciclo mais longo nos últimos meses antes de testar.

4 Como o Clearblue® funciona?

Ele detecta o hormônio da gravidez hCG (gonadotrofina coriônica humana) na urina. A sensibilidade do teste é 25mIU/mL.

5 Algum medicamento ou condição médica pode afetar o resultado?

Sempre leia as instruções dos fabricantes sobre qualquer medicamento que você esteja tomando antes de fazer um teste. Medicamentos com hCG podem afetar o resultado. Gravidez ectópica ou gravidez recente, mesmo que não levada a termo, pode causar resultados incorretos. Se você estiver na menopausa ou perto dela, você pode obter um falso resultado de gravidez, mesmo que não esteja grávida. O teste **NÃO** é afetado por terapias hormonais com citrato de clomifeno, analgésicos, bebidas alcoólicas, antibióticos nem pílula anticoncepcional. Se obter resultados inesperados, você deve conversar com seu médico.

6 E se eu tiver dúvidas sobre o meu resultado?

Para que o seu resultado seja “Grávida”, deve haver uma linha azul na janela de controle e um “+” na janela do resultado em até 10 minutos após fazer o teste.

Resultados “Grávida”

Figura A: Isso é mais provável de ocorrer quando você está grávida e está testando mais de alguns dias depois do atraso menstrual, pois os níveis de hCG estão mais altos.

Figura B: Você pode ver isso se estiver fazendo o teste próximo do dia de início esperado da menstruação, pois os níveis de hCG podem estar relativamente baixos.

Figura C: Isso ainda indica o resultado “Grávida”.

Não importa se uma das linhas que constituem o símbolo “+” for mais clara ou escura que a outra; o resultado é “Grávida”.

Para que o resultado seja “Não grávida”, deve haver uma linha azul na janela de controle e um símbolo “-” (menos) na janela do resultado em até 10 minutos após a realização do teste.

Se você ainda tiver dúvidas sobre seu resultado, espere pelo menos 3 dias antes de fazer um novo teste, tomando cuidado para seguir as instruções.

7 Meu resultado anterior foi “Grávida”, mas repeti o teste e obtive um resultado negativo ou minha menstruação iniciou. O que isso significa?

É possível obter um resultado positivo e depois descobrir que você não está mais grávida. Isso pode ocorrer devido à “perda de gravidez precoce”, que não é incomum, afetando cerca de 1 a cada 4 gestações. A maioria das mulheres pode ter uma gravidez saudável depois disso.

8 Há algo que eu deva fazer se planejo engravidar?

É bom conversar com seu médico antes de tentar engravidar. Muitos médicos afirmam que pode ser benéfico consumir ácido fólico ou suplementos vitamínicos pré-natais, evitar bebidas alcoólicas, parar de fumar e tentar manter um peso saudável. Considere usar um teste de ovulação para identificar seus dias mais férteis. A Clearblue oferece uma variedade de produtos para potencializar suas chances de engravidar.

Erros do teste

A ponta que muda de cor não ficou completamente rosa.

Você pode não ter usado urina suficiente. Contudo, tenha a certeza de que o teste funcionou se a linha de controle aparecer em até 10 minutos após o teste.

Nenhuma linha azul aparece na janela de controle em até 10 minutos após o teste.

O teste não funcionou, possivelmente porque foi usada mais ou menos urina do que o necessário. Repita o teste usando um teste novo e seguindo as instruções com cuidado.

Janela do resultado Janela de controle



0800 047 4467 As chamadas são gratuitas de telefones fixos, mas as chamadas de celulares podem ser cobradas; verifique com sua operadora. Não chame consultor que fale português estiver disponível, você pode falar conosco em inglês ou com a ajuda de um tradutor. Quando ligar, tenha em mãos o produto e a embalagem, incluindo embalagens de papel laminado. As chamadas são gravadas para fins de treinamento e controle de qualidade.

LOT	Código do lote	IVD	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>		Fabricante
	Use no prazo de validade		Limite de temperatura 2 °C a 30 °C		Não reutilize

Autoteste para orientação de gravidez, sem fins diagnósticos.

Sempre leia as instruções dos fabricantes sobre qualquer medicamento que você esteja tomando antes de fazer um teste.

Para autodiagnóstico em casa. Apenas para uso de diagnóstico *in vitro*. Não serve para uso interno. Não reusa. Mantenha longe do alcance de crianças. Armazenar entre 2° - 30°C. Deixe chegar à temperatura ambiente por 30 minutos antes de testar se estiver armazenado em refrigeração. Não use se a embalagem estiver danificada. Não use após a data de validade indicada. Descarte com o lixo normal de casa. Não desmonte o dispositivo. Contém peças pequenas. Não ingira nenhum componente desse dispositivo. Se engolir algum acidentalmente, procure um médico. Relate qualquer dano causado pelo uso desse produto à Clearblue. Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG, anticorpo monoclonal anti-alfa TSH, IgG de cabra, IgG de cabra anti-coelho, IgG de coelho e partículas de látex.

Dados obtidos a partir de estudos disponíveis em www.clearblue.com.br/referenciasbibliograficas

IMPORTADOR: MANDALA BRASIL Importação e Distribuição de Produto Médico Hospitalar Ltda. Av. Horácio Racanello Filho, nº 5570, salas 502, 1201 e 1202, Ed. São Bento, Zona 07, Maringá/PR, Brasil. CEP: 87020-035. CNPJ: 09.117.476/0001-81
Responsável Técnico: Rafaela Bonchoski Siolin - CRF/PR 29240

FABRICANTE: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça. País de origem: China. Clearblue é uma marca registrada da Swiss Precision Diagnostics (SPD). © 2020 SPD. Todos os direitos reservados. Registro ANVISA nº: 80686360214

733293.0 07-2020