


Teste de Gravidez

Saiba Antes



Leia a bula com atenção antes de fazer o teste.

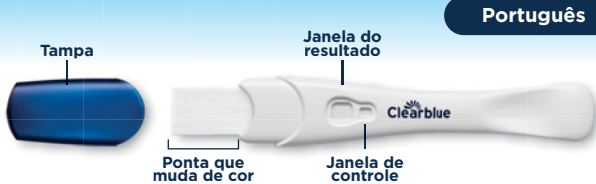

Teste a partir de
6 dias
antes
de seu atraso menstrual!



Se estiver fazendo o teste antes do dia do início esperado da menstruação, use a primeira urina do dia. Do contrário, teste a qualquer hora.



Não beba
muito líquido
antes do teste

Precisão
de 99,9%
a partir do dia do início
esperado da menstruação

1 Faça o teste

Remova da embalagem, retire a tampa e use imediatamente. **Você pode** testar com:

seu fluxo de urina por 5 segundos completos



ou

uma amostra de urina coletada em um recipiente seco e limpo por 20 segundos completos

IMPORTANTE:
mergulhe a
ponta
completamente
como mostrado



IMPORTANTE: A ponta que muda de cor ficará rosa instantaneamente, demonstrando que a urina está sendo absorvida, **mas você DEVE continuar segurando a ponta dentro da urina por todo o tempo indicado acima.** Comece a cronometrar assim que vir a ponta ficar rosa. Se a ponta que muda de cor não ficar completamente rosa, consulte “Erros do teste”. Recoloque a tampa e deixe o medidor de teste na horizontal.

2 Aguarde



Linhas azuis começarão a aparecer. Caso contrário, consulte “Erros do teste”.
Aguarde 3 MINUTOS INTEIROS antes de ler o resultado.

3 Resultados

Grávida — se o resultado for “Grávida”, consulte seu médico (consulte a pergunta 1).

SE APARECEREM DUAS LINHAS, VOCÊ ESTÁ GRÁVIDA. NÃO IMPORTA SE AS LINHAS ESTÃO CLARAS OU ESCURAS.



Figura A



Figura B



Figura C

Não grávida

(consulte a pergunta 2).



Figura D

Se você tiver dúvidas sobre seu resultado, consulte a pergunta 6. Deve haver uma linha azul na janela de controle para que o resultado seja válido. Caso contrário, consulte “Erros do teste”. **IMPORTANTE!** Leia o resultado em até **10 minutos** após o teste. Desconsidere qualquer alteração depois desse período.

Perguntas e respostas

1 Meu resultado é "Grávida". O que devo fazer?

Consulte seu médico para saber quais são os próximos passos. É possível obter um resultado positivo e depois descobrir que você não está mais grávida (consulte a pergunta 7).

2 Meu resultado é "Não grávida". O que isso significa?

Você pode não estar grávida ou o nível de hormônio da gravidez pode ainda não estar alto o suficiente para ser detectado. Faça um novo teste em três dias. Se o resultado desse teste for "Não grávida" e sua menstruação estiver atrasada, consulte seu médico.

3 Quando posso fazer o teste?

Você pode fazer o teste a partir de 6 dias antes de seu atraso menstrual (5 dias antes do início esperado da menstruação). Contudo, como os níveis hormonais variam de mulher para mulher e podem ser muito baixos no início da gravidez, você pode estar grávida e, mesmo assim, obter um resultado negativo. A tabela abaixo mostra o percentual de resultados positivos apontados em exames de laboratório com amostras de urina do início da gravidez:

Dias antes do início esperado da menstruação	1	2	3	4	5
Resultados positivos apontados	>99%	>99%	>99%	96%	79%

4 Como o Clearblue funciona?

Ele detecta o hormônio da gravidez hCG (gonadotrofina coriônica humana) na urina. Ele tem precisão de 99,9% em exames laboratoriais a partir do dia de início esperado da menstruação. A sensibilidade do teste é 10 mIU/ml.

5 Algum medicamento ou condição médica pode afetar os resultados?

Sempre leia as instruções do fabricante sobre qualquer medicamento que você esteja tomando antes de fazer um teste. Se obter resultados inesperados, converse com seu médico sobre eles. Medicções com hCG podem afetar o resultado. Gravidez ectópica ou gravidez recente, mesmo que não levadas a termo, podem causar resultados incorretos. O teste NÃO é afetado por terapias hormonais com citrato de clomifeno, analgésicos comuns, bebidas alcoólicas, antibióticos nem pílula anticoncepcional.

6 E se eu tiver dúvidas sobre o meu resultado?

Se você ver duas linhas, seu resultado é "Grávida". A aparência da linha na janela do resultado pode variar. No entanto, o resultado ainda é "Grávida", independente se as linhas estiverem claras ou escuras.

Consulte as imagens na seção "Resultados".

Figura A: isso é mais provável quando estiver testando antes do início esperado da menstruação, quando seus níveis de hCG podem estar relativamente baixos.

Figura B: isso é comum quando estiver testando no dia ou perto do dia do início esperado da menstruação.

Figura C: isso é mais provável de ocorrer quando você está testando alguns dias depois do dia do início esperado da menstruação, pois os níveis de hCG estão mais altos.

Figura D: Seu resultado é "Não grávida". Se você ainda acha que está grávida, consulte a pergunta 2.

Se você ainda tiver dúvidas sobre seu resultado, espere pelo menos 3 dias antes de fazer um novo teste, tomando cuidado para seguir as instruções.

7 Meu resultado anterior foi "Grávida", mas repeti o teste e obtive um resultado negativo ou minha menstruação iniciou. O que isso significa?

É possível obter um resultado positivo e depois descobrir que você não está mais grávida. Isso se chama "perda de gravidez precoce", que lamentavelmente não é incomum, afetando cerca de 1 a cada 4 gestações. Felizmente, a maioria das mulheres pode ter uma gravidez saudável depois disso.

8 Há algo que eu deva fazer se planejo engravidar?

É bom conversar com seu médico logo de início. Muitos médicos afirmam que pode ser benéfico consumir ácido fólico ou suplementos vitamínicos pré-natais, evitar bebidas alcoólicas, parar de fumar e tentar manter um peso saudável. Considere usar um teste de ovulação para identificar seus dias mais férteis. O Clearblue oferece uma variedade de produtos para potencializar suas chances de engravidar.

Erros do teste

A ponta que muda de cor não ficou completamente rosa.

Você pode não ter usado urina suficiente. Contudo, tenha a certeza de que o teste funcionou se a linha de controle aparecer em até 10 minutos após o teste.

Nenhuma linha azul aparece na janela de controle em até 10 minutos após o teste.

O teste não funcionou, possivelmente porque foi usada mais ou menos urina do que o necessário. Repita o teste usando um teste novo e seguindo as instruções com cuidado.

Janela do resultado

Janela de controle



www.clearblue.com

0800 047 4467

As chamadas são gratuitas de telefones fixos, mas as chamadas de celulares podem ser cobradas; verifique com sua operadora. Se nenhum consultor que fale português estiver disponível, você pode falar conosco em inglês ou com a ajuda de um tradutor. Quando ligar, tenha em mãos o produto e a embalagem, incluindo embalagens de papel laminado. As chamadas são gravadas para fins de treinamento e controle de qualidade.

Para saber os próximos passos, informações e conselhos gerais sobre questões de gravidez, visite nosso site: www.clearblue.com

Autoteste para orientação de gravidez, sem fins diagnósticos.

Use sempre as instruções dos fabricantes sobre qualquer medicamento que você esteja tomando antes de fazer um teste. Para autodiagnóstico em casa.

Para uso em diagnóstico *in vitro* apenas. Não previsto para uso interno.

Não reutilize. Mantenha fora do alcance de crianças. Armazene entre 2 °C e 30 °C. Deixe atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de fazer o teste, se armazenado sob refrigeração. Não use se a embalagem de papel laminado estiver danificada. Não use após o prazo de validade. Descarte com o lixo doméstico normal. Não desmonte o dispositivo. Ele contém peças pequenas. Não coma componentes do dispositivo. Se engolir algo acidentalmente, busque atendimento médico.

79% dos resultados "Grávida" podem ser detectados 6 dias antes de seu atraso menstrual (5 dias antes do início esperado da menstruação).

Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG, anticorpo monoclonal anti-alfa TSH, IgG de cabra, IgG de cabra anti-coelho, IgG de coelho e partículas de látex.

Dados obtidos a partir de estudos disponíveis em www.clearblue.com.br/referenciasbibliograficas

IMPORTADOR: MANDALA BRASIL. Importação e Distribuição de Produto Médico Hospitalar Ltda. Av. Horácio Rangel Filho, nº 5570, salas 502, 1201 e 1202, Ed. São Bento, Zona 07, Maringá/PR, Brasil. CEP: 87020-035. CNPJ: 09.117.476/0001-81

Responsável Técnico: Rafaela Bonchoski Siolin - CRF/PR 29240

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça. País de origem: China.

Clearblue é uma marca registrada da SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD). © 2020 SPD. Todos os direitos reservados.

Registro ANVISA nº: 80686360275

733296.0 07-2020

LOT	Código do lote	IVD	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>	Fabricante
Use no prazo de validade	Limite de temperatura 2 °C a 30 °C	Não reutilize		